

1. CONTENU DE L'EMBALLAGE

- SUPPORT MURAL
- INSTRUCTIONS D'UTILISATION
- GABARIT DE PERÇAGE

2. UTILISATION PREVUE

Le support mural sert à fixer l'aspirateur de mucosités LSU Laerdal et à lui fournir une alimentation électrique dans une ambulance ou sur un chariot de secours.

Le cat. n° 782640 ne dispose pas de connecteur d'alimentation.

3. DESCRIPTION GENERALE

- A - Une poignée de verrouillage
- B - Une plaque supérieure pour le support mural
- C - Des trous de vis pour la partie supérieure
- D - Un connecteur d'alimentation (non fourni sur le 782640)
- E - Axe de positionnement
- F - Des crochets
- G - Des trous de vis pour la partie inférieure
- H - Une plaque inférieure pour le support mural
- I - Des axes de guidage
- J - Un câble (non fourni sur le 782640)

4. REFERENCES CATALOGUE

- 782600 Support mural LSU avec cordon d'alimentation courant continu
- 782610 Support mural LSU avec cordon d'alimentation courant alternatif (Etats-Unis)
- 782620 Support mural LSU avec cordon d'alimentation courant alternatif (UE)
- 782630 Support mural LSU avec cordon d'alimentation courant alternatif (Royaume-Uni)
- 782640 Support mural LSU sans cordon d'alimentation

5. INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE FIXATION MURALE LSU

Prenez le gabarit fourni comme référence lorsque vous suivez les instructions ci-dessous (le gabarit a une échelle de 1/1 et peut-être utilisé directement sur le mur lors de l'assemblage du support mural)

1. Repérez un emplacement adéquat avec suffisamment d'espace pour pouvoir installer le support.
2. Sélectionnez du matériel de fixation capable de maintenir le support bien en place sur la surface de montage choisie. La taille et la résistance des vis doivent permettre de maintenir le support au mur avec une force supérieure à 20g (500N/vis)
3. Le support mural doit être assemblé verticalement, à l'aide d'entretoises si nécessaire.
4. Fixez le gabarit à la surface de montage choisie et percez les trous en fonction du gabarit.
5. Mettre partiellement les vis supérieures [C] (si les vis ne sont pas introduites correctement dans le mur, elles risquent de se détacher à l'intérieur du support)
6. Montez le support sur les 2 vis et déplacez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
7. Placez la vis dans le trou de vis inférieur [G] puis resserrez les vis supérieures.
8. Ne pliez pas le câble sur des bords tranchants.

Remarque : Nous vous conseillons d'assembler le support de fixation murale LSU sur des surfaces fixes. En l'assemblant sur une porte battante, par exemple, des forces supérieures à 20g peuvent être créées.

6. INSTALLATION DU LSU

1. Placez les rainures qui se trouvent sur la partie inférieure du LSU sur les axes de guidage du support [I].
2. Soulevez la poignée de verrouillage[A]
3. Appuyez fermement sur le LSU pour le mettre en place.
4. Abaissez la poignée de verrouillage tout en maintenant le LSU en place. (Attention à ne pas vous coincer ou vous pincer les doigts ou les mains avec les parties amovibles.)
Remarque : Si une force excessive doit être exercée pour pouvoir abaisser la poignée de verrouillage, cela signifie que :
a. le LSU n'est pas placé correctement sur les axes de guidage, ou
b. un corps étranger se trouve entre le LSU et le support de montage.
Dans les deux cas, il se peut que les crochets ne maintiennent pas suffisamment le LSU. Soulevez la poignée de verrouillage et remettez le LSU en position et/ou retirez le corps étranger.
5. Assurez-vous de la stabilité de l'installation. Si le LSU est placé correctement, la poignée de verrouillage doit être totalement orientée vers le bas, par-dessus la poignée du LSU. La diode électroluminescente (DEL) secteur doit être allumée (sauf dans le cas du support mural du LSU 782640, fourni sans câble.)

7. POUR DETACHER LE LSU

1. Soulevez la poignée de verrouillage[A]
2. Retirez le LSU

8. NETTOYAGE

Utilisez un chiffon humecté d'un détergeant doux pour nettoyer les surfaces extérieures.

9. TEMPERATURE

- de service : entre -5°C et +40°C
- de stockage : entre -40°C et +70 °C

10. GARANTIE

Reportez-vous à la Garantie Universelle pour les conditions générales de la garantie, ou bien rendez-vous sur le site Internet www.laerdal.com

11. ENTRETIEN

L'appareil ne contient aucune pièce réparable.

12. COMPOSANTS ET DEMONTAGE


Nous vous conseillons, lorsque vous enlevez le support mural, de le démonter selon le protocole local. Pour démonter le support mural, il vous suffit de dévisser les vis qui se trouvent à l'arrière du support, puis de retirer les éléments et de les classer selon le tableau ci-dessous.



Pièces en plastique bleu	Polyamide et fibre de verre
Pièces en plastique jaune	Polyamide et fibre de verre
Etiquettes	Plastique polycarbonate
Plaque arrière	Aluminium
Plaque à crochet	Acier
Ressorts	Acier
Axes de charnière	Acier
Vis	Acier
Câble	Câble (non fourni sur le 782640)

Le support mural peut également être envoyé chez votre représentant Laerdal Medical en vue d'être démonté. Laerdal Medical AS ne réclamera aucune rémunération pour le démontage, seuls les frais d'envoi seront à la charge de l'expéditeur.

LSU Wall Bracket

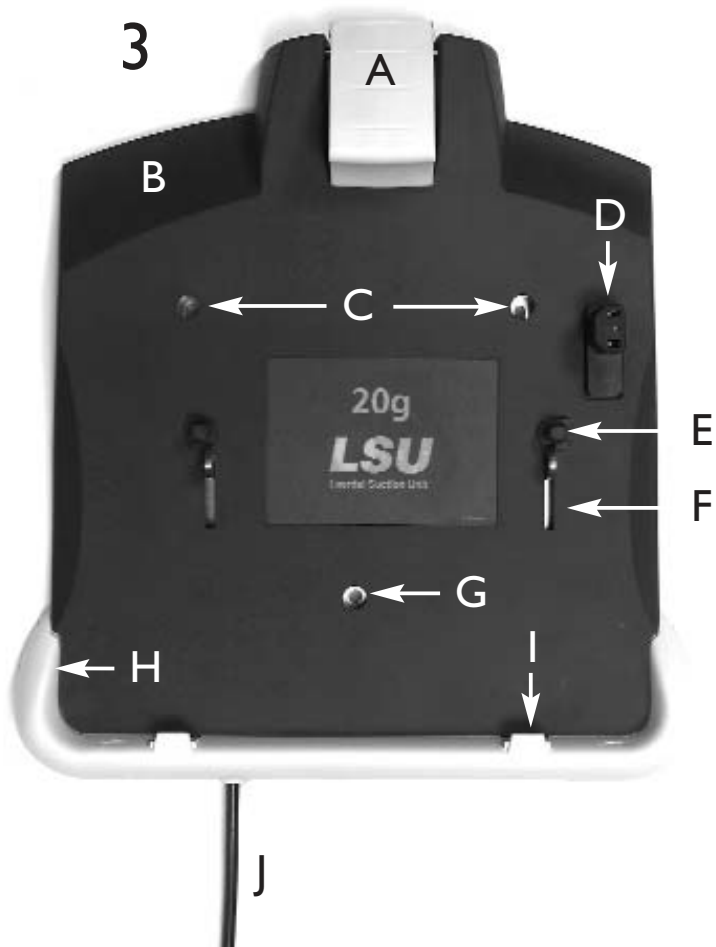

Manufacturer:
Laerdal Medical AS
Stavanger, Norway

Distribution:
For World Wide distribution, see Global
Warranty or www.laerdal.com.



Laerdal
helping save lives

www.laerdal.com

