

BABY STAP

Mode d'emploi



TABLE DES MATIERES

Contenu:	2
Préparation du simulateur pour son utilisation et remplacement des tuyaux de la moelle épinière:.....	2
Précautions et entretien:	3
Pièces de rechange:	3

Le Baby Stap (réf. 375-34001) simule un nouveau-né réaliste. Il est conçu spécialement pour former les professionnels à la pratique des techniques de ponction lombaire.

La qualité de fabrication de ce produit devrait permettre d'assurer de nombreuses années de formation s'il est correctement entretenu.

Contenu:

1. Baby Stap
2. Livret de garantie globale Laerdal
3. Mode d'emploi

Préparation du simulateur pour son utilisation et remplacement des tuyaux de la moelle épinière:

1. Faire un noeud à l'extrémité du tuyau en latex et insérer le tuyau dans la colonne vertébrale
2. Insérer la colonne vertébrale dans le simulateur
3. Remplir la bouteille d'eau
4. Fixer la bouteille à l'extrémité du tuyau sur le simulateur
5. Mettre la bouteille d'eau au-dessus du simulateur
6. Insérer une seringue dans la moelle épinière et ôter l'excès d'air dans les tuyaux.

Le produit est prêt pour la ponction lombaire.

REMARQUE : le trainer peut être mis soit en position décubitus latérale soit en position assise.

Précautions et entretien:

1. Nettoyer avec du savon doux et de l'eau ; ne pas immerger le mannequin ou les pièces détachées dans des détergents ou dans de l'eau.
2. Travailler toujours sur une surface propre. Éviter l'utilisation de marqueurs, stylos à encre, d'acétone, d'iode ou autres agents colorants et ne pas mettre le mannequin sur du papier journal, cela risquerait de le tacher.
3. Pour garantir une bonne longévité, chaque mannequin et chaque module doivent être nettoyés à la fin de chaque session de formation et un contrôle général doit être effectué régulièrement.
4. Les modules et toutes les autres pièces détachées doivent être vidés et correctement séchés à l'air avant d'être rangés et désinfectés si nécessaire.
5. Mettre un peu de talc sur les pièces d'articulation avant les sessions de formation.
6. Ranger les pièces correctement entre chaque session de formation.

Pièces de rechange:

Référence	Désignation
375-34001	Baby Stap
375-32350	Bouteille à large ouverture
375-34150	Tuyau de la colonne vertébrale

Attention:

Ce produit contient du latex susceptible de provoquer des réactions allergiques en cas de contact avec la peau.