

# Tête d'intubation Nouveau Né

## Mode d'emploi



## TABLE DES MATIERES

<b>Introduction:</b> .....	2
<b>Recommandations de Laerdal</b> .....	2
<b>Mode d'emploi:</b> .....	2
<b>Contenu</b> .....	2
<b>Techniques enseignées</b> .....	3
<b>Mode d'emploi</b> .....	3
<b>Précautions et entretien</b> .....	3
<b>Pièces de rechange</b> .....	4

---

## Introduction:

La tête d'intubation nouveau-né Laerdal (Réf. 250-00101) est une tête de mannequin réaliste qui simule parfaitement celle d'un nouveau-né. Elle est conçue spécialement pour former les professionnels à la pratique de l'intubation naso ou oro-trachéale.

La qualité de fabrication et la facilité de remplacement des pièces individuelles de cette tête permettent d'assurer de nombreuses années de formation si elle est correctement entretenue.

## Recommandations de Laerdal

Sonde d'intubation trachéale sans ballonnet  
(diamètre interne 2,5 mm)  
Lubrifiant pour mannequin ou savon liquide  
Manche de laryngoscope  
Lame de laryngoscope n°0 ou n°1.

### **Attention:**

Ce produit contient du latex en **caoutchouc naturel** susceptible de provoquer des réactions allergiques en cas de contact.

## Contenu

- 1) Tête d'intubation nouveau-né Laerdal™
- (1) Lubrifiant pour mannequin
- (1) Livret de Garantie global Laerdal
- (1) Mode d'emploi

## Techniques enseignées

- Intubation oro et naso-trachéale
- Ventilation à l'insufflateur manuel et au masque
- Pose correcte de la sonde d'intubation trachéale

## Mode d'emploi

L'intubation trachéale nécessite l'utilisation du matériel suivant :

- Sonde d'intubation sans ballonnet (diamètre interne 2,5 mm)
- Lubrifiant (ou savon liquide)
- Manche de laryngoscope
- Lame de laryngoscope n°0 ou n°1.

1. Vaporiser toutes les sondes avec du lubrifiant avant de les insérer dans les voies respiratoires.
2. Vaporiser l'intérieur de chaque narine avec du lubrifiant avant l'intubation nasale.

## Précautions et entretien

1. Nettoyer avec du savon doux et de l'eau ; ne pas immerger le mannequin ou les pièces détachées dans des détergents ou dans de l'eau.
2. Travailler toujours sur une surface propre. Éviter l'utilisation de marqueurs, stylos à encre, d'acétone, d'iode ou autres agents colorants et ne pas mettre le mannequin sur du papier journal, ce qui risquerait de le tacher.
3. Pour garantir une certaine longévité, chaque mannequin et chaque module doivent être nettoyés à la fin de chaque session de formation et un contrôle général doit être effectué régulièrement.
4. Les modules et toutes les autres pièces détachées doivent être vidés et correctement séchés à l'air avant d'être rangés et désinfectés si nécessaire.

5. Mettre un peu de talc sur les pièces d'articulation avant les sessions de formation.
6. Ranger les pièces correctement entre chaque session de formation.

## Pièces de rechange

<b>Référence</b>	<b>Description</b>
250-00350	Jeu de poumons
250-00450	Tête
250-00550	Ensemble base/cache
250-20350	Base de fixation de la tête
250-20450	Couvercle transparent
250-21050	Lubrifiant pour mannequin

Ce produit est conforme aux principales exigences de la Directive du Conseil 89/336 CEE ; Directive EMC