

Tête d'intubation difficile

Mode d'emploi



Laerdal[™]
helping save lives

Sommaire

Recommandations de Laerdal	4
Articles inclus	5
Techniques enseignées	5
Préparation du mannequin avant utilisation	6
Mode d'emploi	6
Précautions et entretien	7
Pièces de rechange	7

La Tête d'intubation difficile (261-00001) est une tête de mannequin grandeur nature qui simule de manière réaliste celle d'un patient. Elle est spécialement conçue pour former les professionnels à la gestion des voies respiratoires.

Grâce à sa construction de qualité et à la facilité de remplacement de chaque pièce, ce simulateur devrait permettre de s'entraîner pendant des années à condition d'être correctement entretenu.

Recommandations de Laerdal

Tube endotrachéal de 7,5 pour prolonger la durée de vie du mannequin (vous pouvez aussi utiliser un tube de 8,5)

Lames de laryngoscope droites ou courbées laryngoscope de taille 3 ou 4

Articles inclus :

- (1) Tête d'intubation difficile
- (1) Ensemble de six (6) peaux de cou
- (1) Rouleau de remplacement de la membrane cricoïdienne
- (1) Flacon de lubrifiant pour mannequin
- (1) Livret de garantie internationale Laerdal
- (1) Consignes d'utilisation

Techniques enseignées :

Compétences pour la gestion des voies respiratoires :

- Intubation endotrachéale
- Jet ventilation transtrachéale
- Intubation naso-trachéale
- Intubation orale sous fibroscope
- Intubation numérique
- Intubation nasale sous fibroscope
- Intubation rétrograde
- Cricothyroïdotomie chirurgicale

- Systèmes de ventilation avec protection des voies aériennes (EOA/PLT)
 - Cricothyroïdotomie à l'aiguille
 - Combitube®
 - Stylet d'intubation
 - Techniques d'aspiration
 - Insertion oropharyngées et nasopharyngées dans les voies respiratoires
 - Masque respiratoire/avec valve
 - Auscultation de l'estomac afin de vérifier le bon positionnement des voies respiratoires



Précautions d'emploi et avertissement

Ce produit contient du latex en caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques en cas de contact avec les êtres humains.

Préparation du mannequin avant utilisation :

Rouleau de membrane crycoïdienne transparente :

1. Dégagez le cou afin de visualiser l'orifice, moulé à l'endroit de la membrane cricoïdienne.
2. Découpez une bande de deux (2) pouces (5 cm) dans le rouleau de membrane cricoïdienne.
3. Appliquez-la sur l'orifice afin de créer la membrane actuelle. **REMARQUE :** Une bonne étanchéisation améliorera la sensation et le bruit de ponction dans la membrane cricoïdienne. (Figure 1)

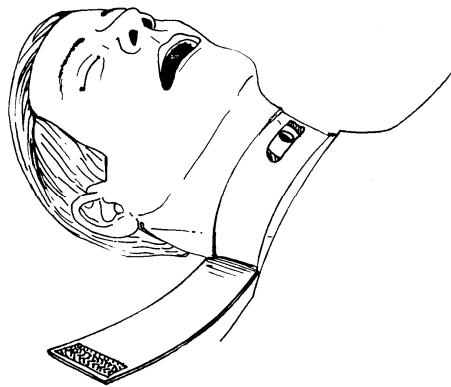


Fig. 1

Collier de peau de cou :

1. Déposez un collier de peau de cou dans la partie moulée autour du cou du mannequin.
2. Attachez le collier à l'aide des bandes Velcro®.
REMARQUE : le collier est conçu pour fournir plusieurs sites de ponction et pratiquer les techniques chirurgicales. Si vous avez besoin d'un site de ponction neuf, faites glisser le collier vers la droite ou vers la gauche.

Mode d'emploi :**Gestion des voies respiratoires :**

1. Vaporisez l'intérieur du pharynx, les deux narines ainsi que tous les tubes d'intubation avec une grande quantité de lubrifiant fourni pour le mannequin. (Vous pouvez utiliser du savon liquide au lieu du lubrifiant pour mannequin.)
2. Même s'il est possible d'insérer des tubes endotrachéaux de 8,5, nous recommandons d'utiliser des tubes de 7,5 afin de prolonger la durée de vie du mannequin.
REMARQUE : en cas de mauvaise ventilation, l'air passera à travers l'œsophage, entraînant une distension de l'abdomen.
3. Utilisez des lames de laryngoscope droites ou courbées de taille 3 ou 4.

Précautions et entretien :

1. Lavez avec un savon doux et de l'eau ; n'immergez pas le mannequin ou des parties du mannequin dans des liquides de nettoyage ou de l'eau.
2. Utilisez uniquement sur une surface propre. Évitez d'utiliser des marqueurs, des stylos à encre, de l'acétone, de l'iode ou d'autres produits de teinture et évitez de placer le mannequin sur du papier journal ou n'importe quel type de supports encrés.
3. Afin de garantir une longue durée de vie du mannequin, nettoyez-le après chaque séance de formation et effectuez régulièrement une inspection générale.
4. Les modules et toutes les autres pièces doivent être parfaitement drainés et séchés avant le stockage et désinfectés si cela est nécessaire.

5. Nous vous recommandons d'appliquer une petite quantité de talc sur les pièces articulées avant les séances de formation.
6. Stockez le mannequin de manière adéquate entre les séances de formation.

Pièces de rechange :

Numéro	Produit
200-00250	Rouleau, membrane cricoïdienne
261-00150	Tête sans poumons
261-00250	Ensemble de peaux de cou, Tête d'intubation difficile
300-01550	Sac poumon, 1,2 Litre

©Laerdal Medical, Gatesville TX. Tous droits réservés
1001991 rév B
30 août, 2006