

TETE D'INTUBATION NOUVEAU-NE

(réf. 250-00101)

Sommaire

Introduction	1
Recommandations de Laerdal	1
Articles inclus	1
Techniques enseignées	1
Mode d'emploi	2
Précautions et entretien	2
Pièces de rechange	2

Introduction

La tête d'intubation nouveau-né Laerdal™ (250-00101) est une tête de mannequin réaliste qui simule parfaitement celle d'un nouveau-né. Elle est conçue spécialement pour former les professionnels à la pratique de l'intubation naso ou oro-trachéale.

La qualité de fabrication et la facilité de remplacement des pièces individuelles de cette tête devraient permettre d'assurer de nombreuses années de formation si elle est correctement entretenue.

Recommandations de Laerdal

Sonde d'intubation trachéale sans ballonnet (diamètre interne 2,5 mm)
Lubrifiant pour mannequin ou savon liquide
Manche de laryngoscope
Lame de laryngoscope n°0 ou n°1.

Attention : Latex

Ce produit contient du latex en caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques en cas de contact.

Articles inclus

- 1) Tête d'intubation nouveau-né Laerdal™
- (1) Lubrifiant pour mannequin
- (1) Livret de Garantie mondiale Laerdal
- (1) Mode d'emploi

Techniques enseignées

Intubation oro et naso-trachéale
Ventilation à l'insufflateur manuel et au masque
Pose correcte de la sonde d'intubation trachéale

Mode d'emploi

L'intubation trachéale nécessite l'utilisation du matériel suivant :

Sonde d'intubation sans ballonnet (diamètre interne 2,5 mm)

Lubrifiant (ou savon liquide)

Manche de laryngoscope

Lame de laryngoscope n°0 ou n°1.

1. Vaporiser toutes les sondes avec du lubrifiant avant de les insérer dans les voies respiratoires.
2. Vaporiser l'intérieur de chaque narine avec du lubrifiant avant l'intubation nasale.

Précautions et entretien

1. Nettoyer avec du savon doux et de l'eau ; ne pas immerger le mannequin ou les pièces détachées dans des détergents ou dans de l'eau.
2. Travailler toujours sur une surface propre. Éviter l'utilisation de marqueurs, stylos à encre, d'acétone, d'iode ou autres agents colorants et ne pas mettre le mannequin sur du papier journal, ce qui risquerait de le tacher.
3. Pour garantir une certaine longévité, chaque mannequin et chaque module doivent être nettoyés à la fin de chaque session de formation et un contrôle général doit être effectué régulièrement.
4. Les modules et toutes les autres pièces détachées doivent être vidés et séchés à l'air correctement avant d'être rangés et désinfectés si nécessaire.
5. Mettre un peu de talc sur les pièces servant à l'articulation avant les sessions de formation.
6. Ranger les pièces correctement entre chaque session de formation.

Pièces de rechange

Numéro de référence :	Description
250-00350	Jeu de poumons
250-00450	Tête
250-00550	Ensemble base/cache
300-00650	Lubrifiant pour mannequin

Ce produit est conforme aux principales exigences de la Directive du Conseil des Ministres 89/336 CEE ; Directive EMC