

Réf. 101-10001

EXTRI KELLY

MODE D'EMPLOI

L'EXTRI KELLY réf. 101-10001 est un mannequin corps entier réaliste simulant une victime. Il est spécialement conçu pour un entraînement aux techniques de dégagement. Etant donné la qualité apportée à la fabrication et le remplacement aisé des pièces détachées, ce matériel est prévu pour être utilisé pendant de nombreuses années s'il est bien entretenu.

PREPARATION DU MANNEQUIN AVANT UTILISATION :

1. Tête :

La tête est reliée au torse au moyen d'une grosse vis à la base du cou, serrée par un écrou à ailettes. Oter la plaque de la poitrine du torse et dévisser l'écrou ; la tête peut alors être glissée hors du torse.

2. Plaque souple de la poitrine :

La plaque de la poitrine s'adapte sur le torse en faisant glisser la saillie dans la rainure située dans la cavité du torse. Tirer la plaque en appuyant sur son centre puis la sortir, les doigts étant placés sous la saillie. Pour la mettre en place, positionner la plaque au-dessus de la cavité du torse puis insérer les saillies dans les rainures.

3. Plaque de l'abdomen

La plaque de l'abdomen s'adapte dans la partie inférieure du torse en faisant glisser la saillie dans la rainure située dans la cavité du torse. Tirer la plaque en appuyant sur son centre puis la sortir, les doigts étant placés sous la saillie. Pour la mettre en place, positionner la plaque au-dessus de la cavité du torse puis insérer les saillies dans les rainures.

4. Articulations de la taille, du coude, du genou et de la cheville

Ces articulations sont reliées au moyen d'une vis et d'un écrou à ailettes. Pour les enlever, dévisser l'écrou à ailettes et retirer la vis de l'articulation. Les parties vont ensuite se détacher facilement. Lors de l'assemblage, il est conseillé d'utiliser de la poudre de talc pour rendre leur fonctionnement plus aisé.

5. Bras et jambes

Les bras sont fixés à l'aide d'une vis, de trois rondelles, d'un ressort et d'un écrou à ailettes. Pour fixer le bras, ôter la plaque poitrine pour localiser le trou dans l'épaule. Enlever le coussinet du deltoïde vers l'épaule en pinçant la peau au centre du coussinet tout en le retirant. Localiser le sachet contenant la visserie. Faire glisser une rondelle dans la vis. Insérer la vis dans le trou situé sur le bras puis dans le trou situé dans l'épaule du mannequin. Faire glisser une rondelle, un ressort, une seconde rondelle et un écrou à ailettes dans la vis. Utiliser un tournevis pour maintenir la vis et serrer l'écrou à ailettes (cf. illustration 1). Pour enlever les bras, suivre la procédure inverse.

Les jambes sont fixées à l'aide d'une vis, d'un ressort, d'une grande rondelle, d'une petite rondelle et d'un écrou à ailettes. Pour fixer les jambes, enlever la plaque de l'abdomen pour localiser le trou situé dans la hanche. Oter le coussinet d'injection de la cuisse en pinçant la peau au centre du coussinet tout en le retirant. Localiser la visserie. Faire glisser le ressort puis la petite rondelle dans la vis. Insérer la vis dans le trou situé au niveau du pelvis. Faire glisser la grande rondelle puis l'écrou à ailettes dans la vis. Utiliser un tournevis pour visser l'écrou (cf. illustration 2). Pour enlever les jambes, suivre la procédure inverse.

ENTRETIEN

1. Utiliser le mannequin sur une surface propre. EVITER LES FEUTRES, LES STYLOS A ENCRE, L'ACETONE, L'IODINE AU AUTRES COLORANTS. NE PAS METTRE LE MANNEQUIN SUR DU PAPIER JOURNAL OU DES ELEMENTS ENCRE QUELS QU'ILS SOIENT.
2. Une légère application de poudre de talc est conseillée pour les articulations.
3. Nettoyer à l'aide d'un savon doux et de l'eau. NE PAS IMMERGER LE MANNEQUIN.
4. Le mannequin doit être vérifié régulièrement.
5. Stocker le mannequin correctement entre les sessions de formation.

GARANTIE

L'Extri Kelly est garanti un (1) an. Tous défauts ou pièces manquantes doivent être signalées dans les 30 jours après la date d'envoi pour entrer dans le cadre de la garantie. La responsabilité quant au bon fonctionnement du produit incombe de manière irrévocable au propriétaire ou à l'utilisateur dans la mesure où le suivi ou la réparation du matériel est effectuée par du personnel non qualifié ou si le produit est utilisé pour d'autres fonctions que celles pour lequel il a été conçu. Laerdal Médical France ne peut être tenue responsable de tous dommages provoqués par un non suivi des recommandations indiquées dans le mode d'emploi. Pour les réparations, il convient de contacter notre service après-vente en donnant le numéro de série du mannequin qui se trouve dans le logement de la poitrine après avoir enlevé la plaque de la poitrine.